

Installation of Plier Grips


REF 200-115

Instructions for Use

INSTALLATION OF PLIER GRIPS


Place grip in boiling water (at least 190°F) for 1 minute.

FIG. A

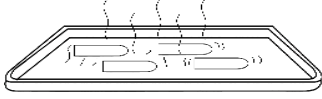


Spread and grip head of pliers, using a towel for cushion.

FIG. B

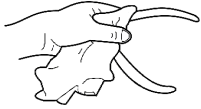

Remove grip from water with tweezers or forceps, drain water from grip then slide grip onto instrument handle.

FIG. C

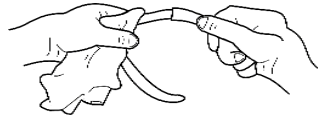

Repeat procedure for other handle.

MONTAGE DES POIGNÉES D'UNE PINCE

Placez la pince dans de l'eau bouillante (au moins 88° C) pendant une minute.

FIG. A




Ouvrez et saisissez, avec un chiffon, la tête de la pince.

FIG. B



Retirez la poignée de l'eau avec des pincettes ou des pinces, égouttez la poignée, puis enfitez-la sur le manche de l'instrument.

FIG. C

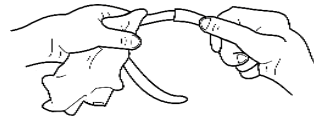


Répétez la procédure pour l'autre poignée.

ANBRINGEN DER ZANGENGRIFFFÜBERZÜGE

Den Überzug mindestens 1 Minute lang in kochendes Wasser (mindestens 88°C) legen.

Abb. A

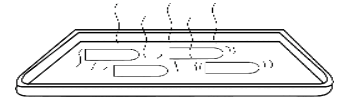


Die Zange öffnen, und den Kopf mit einem Handtuch als Polster halten.

Abb. B



Den Überzug mit einer Zange oder Pinzette aus dem Wasser nehmen, das Wasser abtropfen lassen, und den Überzug auf einen Handgriff des Instruments aufziehen.

Abb. C

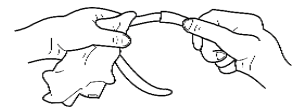


Den Vorgang mit dem anderen Handgriff wiederholen.

MONTAGGIO DELL'IMPUGNATURA PER PINZA

Immergere l'impugnatura in acqua bollente (ad almeno 88°C) per 1 minuto.

FIG. A

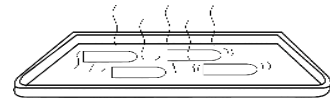


Allargare le branche afferrando la testa della pinza con una salvietta.

FIG. B



Con delle pinze, rimuovere l'impugnatura dal bagno d'acqua, farla sgocciolare e inserirla su una delle branche della pinza.

FIG. C

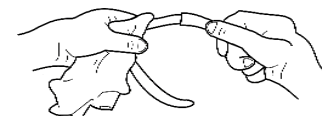

Ripetere la procedura per l'altra branca.

INSTALACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS DE SUJECIÓN PARA LAS ASAS DEL ALICATE

Coloque los recubrimientos de las asas en agua hirviendo (a una temperatura de 88°C como mínimo) durante 1 minuto.

FIG. A




Abra los brazos del alicate utilizando una toalla a manera de almohadilla.

FIG. B



Retire un recubrimiento del agua con unas pinzas o fórceps, escurra el agua y deslícelo sobre el brazo del asa del alicate.

FIG. C

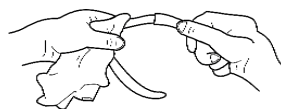

Repita el procedimiento para el otro brazo.



Distributed by:

Ortho Organizers, Inc.
1822 Aston Avenue
Carlsbad, CA 92008
USA

Tel: 800.547.2000, +(1) 760 448 8600
Fax: 800.888.7244, +(1) 760 448 8607
USASales@OrthoOrganizers.com
IntlOrders@OrthoOrganizers.com

Visit the *Ortho Organizers' Web site at*
OrthoOrganizers.com



mdi Europa GmbH

Langenhagener Str. 71
30855 Langenhagen, Germany
49 511 39 08 9530



Certificate
#FM 35078



OMA Member
Orthodontic Manufacturers
Association

Made
in the
USA

INS11A
Rev B